

## PROYECTO DE INSTRUCTIVO DE USO

### **lalumar®**

NEBULIZADOR DE SOLUCIÓN ISOTÓNICA

Agua de mar y sal sódica de ácido hialurónico

#### **Para la higiene diaria de la nariz y los oídos de adultos y niños**

**IALUMAR®** combina la acción beneficiosa y fluidificante del agua marina con la acción del ácido hialurónico, que, gracias a su capacidad de atraer y retener el agua, hidrata la mucosa y favorece la cicatrización de posibles micro lesiones. La dilución del agua de mar hasta una concentración isotónica hace que, además, **IALUMAR®** no sea irritante.

#### **INDICACIONES**

**IALUMAR®** está indicado para la higiene nasal diaria de adultos y niños. Favorece la eliminación de las secreciones nasales excesivas. Alivia rápidamente la sequedad de las mucosas debido a la actividad humectante del Hialuronato de Sodio (sal sódica del ácido hialurónico). Está especialmente indicado en caso de rinitis, rinosinusitis o tras intervenciones quirúrgicas de las fosas nasales ya que facilita la curación de micro lesiones de la mucosa y la piel.

**IALUMAR®** está indicado para la higiene diaria de los oídos de adultos y niños. Evita la formación de tapones de cera, contribuye a mantener limpio el meato auditivo y evita la acumulación de partículas extrañas que pueden ocasionar posibles trastornos auditivos. También es útil para las personas que utilizan audífonos.

#### **COMPOSICIÓN**

Cada nebulizador de 100 mL contiene: agua de mar y hialuronato de sodio.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**ialumar®:** 1 nebulizador a presión contiene 100 mL de solución + 1 aplicador para uso nasal y 1 aplicador para uso ótico, sellados en bolsas.

En el interior del frasco metálico, la solución queda aislada del medio propelente porque está contenida en una bolsa de material no tóxico. El medio propelente es aire introducido a presión en todo el espacio que rodea a la bolsa, que se encuentra en el interior de la botella metálica. La liberación del producto se produce a través de una válvula situada encima de la bolsa.

Gracias a este sistema:


- Se utiliza aire como gas propelente, por tanto, el producto no daña la capa de ozono.
- No es necesario utilizar conservantes, por tanto, se reducen las posibilidades de que aparezcan reacciones alérgicas.
- El frasco puede utilizarse en cualquier posición, de modo que el producto es práctico y fácil de usar.

## FRECUENCIA DE USO

Utilizar varias veces al día, según necesidad.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa del frasco y coloque el aplicador correspondiente sobre la válvula: para la utilización en la nariz, utilice el aplicador representado en la Figura A; para la utilización en el oído, utilice el aplicador representado en la Figura B.

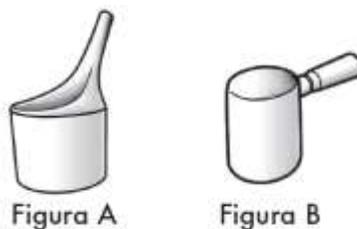

2. Presione sobre el aplicador para nebulizar el producto.
3. Después del uso, limpie y seque el aplicador.



**NARIZ:** El producto puede utilizarse en cualquier posición. Sin embargo, se aconseja inclinar la cabeza hacia un lado y nebulizar el producto durante 2 segundos en la fosa nasal del lado opuesto (p. ej., cabeza inclinada hacia la derecha y producto nebulizado en la fosa nasal izquierda). Repita la operación en ambas fosas.



**OÍDO:** El producto puede utilizarse en cualquier posición. Sin embargo, se aconseja situarse delante del lavabo, inclinar la cabeza hacia un lado y nebulizar una o dos veces en el oído orientado hacia abajo. Espere algunos segundos y séquese delicadamente.

## ADVERTENCIAS

Recipiente a presión: protéjalo de los rayos solares y no lo exponga a temperaturas superiores a 25 °C

No utilice **lalumar**® después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

No utilice **lalumar**® si el nebulizador está dañado.

No perforo ni queme el nebulizador una vez terminado el producto.

Una vez utilizado, deshágase del nebulizador siguiendo las normas de eliminación de residuos de su localidad.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## INTERACCIONES

No se han descrito interacciones entre **lalumar**® y otros medicamentos.

## CONTRAINDICACIONES Y REACCIONES ADVERSAS

**ialumar**® está contraindicado en personas con antecedentes de otorrea (inflamación del canal auditivo), perforación del tímpano u otitis media.

No se han descrito reacciones adversas derivadas de su utilización.

## LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Número de lote
	Fecha de Caducidad
	Conservar protegido de la luz solar
	Advertencias o Precauciones
	Temperatura máxima
	Responsable Legal de la fabricación



**Meda Pharma S.p.A.**

Via Valosa di Sopra, 9 – 20900 Monza, Italia.

**Importado y distribuido en México por:**

**Meda Pharma S. de R.L. de C.V.**

Avenida Industria Automotriz No. 128, Lote C,  
Subíndice 44, Edificio A-2, Parque Industrial el  
Cocillo, C.P. 50246, Toluca de Lerdo, Estado de  
México, México.

**DISPOSITIVO MÉDICO**



País de origen Italia.

Reg. No. 0657C2018 SSA

® Marca Registrada

[Logos]

Fecha de última revisión: Mayo 2018

**MEDA**